

# Implantate fürs Leben

Tägliche Pflege für  
herausnehmbare Prothesen



Dentsply  
Sirona

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mit dem Erhalt von herausnehmbaren implantatgetragenen Zahnprothesen gewinnen Sie die ästhetischen und funktionellen Eigenschaften zurück, die Sie von Ihren natürlichen Zähnen her kennen. Wie natürliche Zähne auch, benötigen Prothesen eine regelmäßige Pflege, um ein gesundes Gewebemilieu zu gewährleisten.

Die richtige Pflege ist der Schlüssel zu einer sicheren und strahlenden Zukunft Ihrer Zähne. Die Reinigung Ihrer herausnehmbaren Prothese ist genauso wichtig wie normales Zähneputzen.


Benutzen Sie eine Zahncreme mit sanften Putzkörpern.

Die herausnehmbare Prothese muss jeden Tag gründlich gereinigt werden, wenn Sie viele Jahre Freude daran haben möchten. Es empfiehlt sich daher, bei der Reinigung des Mundinnenraums auf eine gewisse Routine zu achten, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gereinigt werden.

# KUGELKOPFANKER-PROTHESE

## Wichtige zu reinigende Bereiche

- Prothese und deren Halterungen einschließlich der Unterseite
- Kugelkopfancker und umgebendes Zahnfleisch

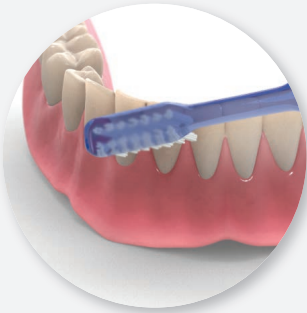

1. Zahnbürste



2. Reinigen der Kugelkopfancker



3. Winkelbürste mit Borstenbündel



4. Zahnseite

# SCHRITTWEISE ANLEITUNG

## 1. Reinigen der Prothese

Reinigen Sie die Prothese und ihre Unterseite, in die die Befestigungen für die Kugelkopfkanker oder die Halterungen für die Stege eingearbeitet sind, sorgfältig mithilfe einer Prothesenbürste oder einer normalen Zahnbürste. Eine elektrische Zahnbürste ist eine gute Alternative und leicht zu handhaben.

## 2. Reinigen der Halteelemente

Reinigen Sie das Zahnfleisch mit einer normalen weichen Zahnbürste. Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie auf die implantatgetragenen Kugelkopfkanker oder Stege im Mund richten. HINWEIS: Verwenden Sie keine Prothesenbürste zur Reinigung im Mund.

## 3. Winkelbürste mit Borstenbündel

Eine gewinkelte Einbüschelbürste ist für die Reinigung rund um die Kugelkopfkanker oder die implantatgetragenen Stege gut geeignet.

## 4. Interdentalbürste (Zwischenraumbürste)

Zwischenraumbürsten eignen sich zur Reinigung aller Ober- und Seitenflächen der implantatgetragenen Stege. Die Interdentalbürsten sind üblicherweise mit einem kunststoffummantelten Draht ausgestattet und in unterschiedlichen Größen erhältlich. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Zahnarzt um Rat. HINWEIS: Benutzen Sie keine Zahnpasta für die Zwischenraumreinigung.

## 5. Zahnseide

Reinigen Sie die Halteelemente, indem Sie einen dickeren Faden Zahnseide in sanften Bewegungen an ihnen entlang führen. „Polieren“ Sie jeden Kugelkopfkanker von oben nach unten, wobei die Zahnseide unter den Zahnfleischrand rutschen darf. Wenn Sie eine Stegversorgung haben, führen Sie die Zahnseide in senkrechten Bewegungen rund um den Steg.

---


# STEGPROTHESE

## Wichtige zu reinigende Bereiche


- Prothese und deren Halterungen einschließlich der Unterseite
- Steg und umgebendes Zahnfleisch




2. Reinigen des Stegs

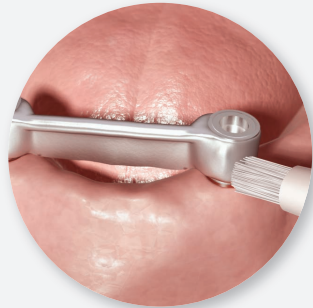

3. Winkelbürste mit Borstenbündel

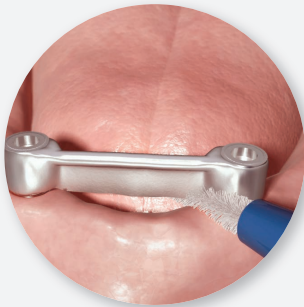

4. Interdentalbürste  
(Zwischenraumbürste)

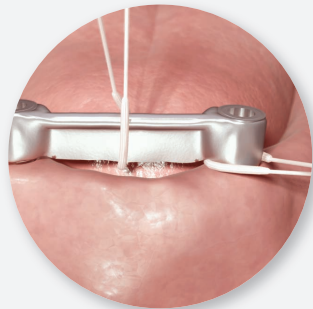

5. Zahnseide



## FOLGETERMINE

Ihre neue Zahnprothese benötigt die gleiche Pflege wie natürliche Zähne. Dies schließt regelmäßige Untersuchungen bei einem Zahnarzt ein.

Bei diesen Besuchen werden Sie und Ihr Zahnarzt bzw. Ihre Zahnarthelferin alle nötigen Maßnahmen zur Pflege und dauerhaften Hygiene Ihrer „Dritten“ besprechen.

Zahnarzt oder Helferin werden Ihnen vorschlagen, in welchen Abständen Sie Termine für künftige Kontrolluntersuchungen einplanen sollten.

Persönliche Anmerkungen/nächster Termin:

---

---

---

---

---

Ihr Zahnarzt:

---

---

Adresse:


---

---


Telefon:

---

Platzierung Ihrer Implantate  
X = Implantatplatzierung

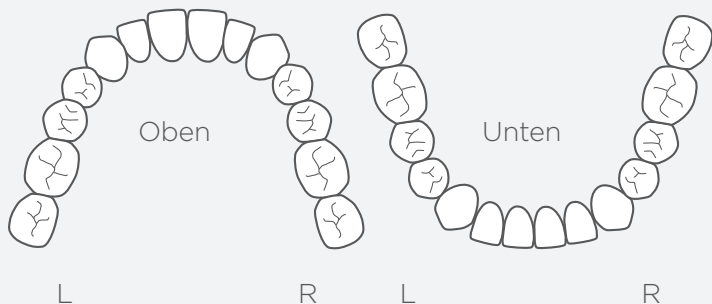

Mit dem Erhalt von implantatgetragendem Zahnersatz gewinnen Sie die ästhetischen und funktionellen Eigenschaften zurück, die Sie von Ihren natürlichen Zähnen her kennen. Wie natürliche Zähne auch, benötigen implantatgetragene Zahnkronen oder Brücken eine regelmäßige Pflege, um ein gesundes Gewebemilieu zu gewährleisten.

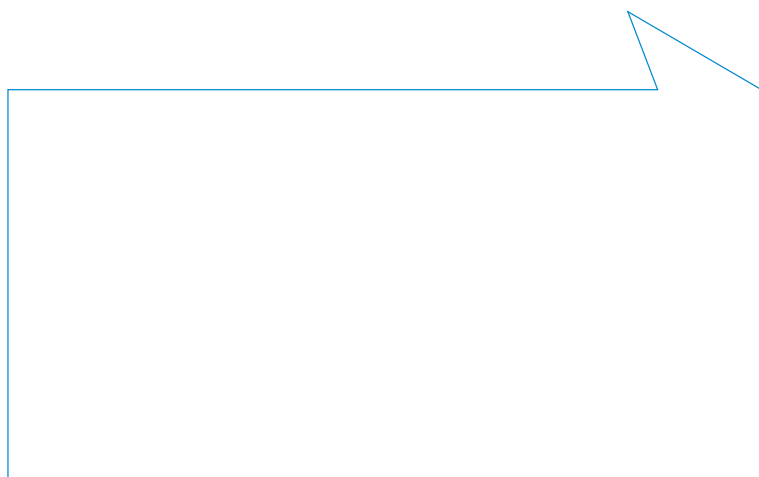

Erfahren Sie mehr über Zahnimplantate unter  
[www.implantatefuersleben.de](http://www.implantatefuersleben.de)